

사용자 매뉴얼

Part 1.

기기 사용방법

Part 2.

어플리케이션 사용 방법

Part 3.

실제로 사용하기


어플리케이션 사용 방법 ▶ 회원가입



시작 메인 화면




회원 가입
사용자 동의 진행

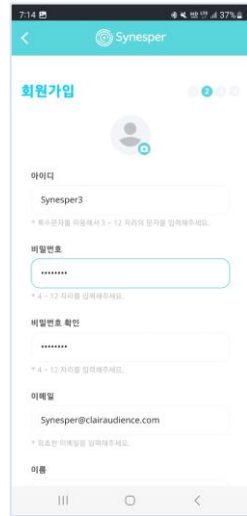


아이디 & 비밀번호
생성



사용자 정보 기입

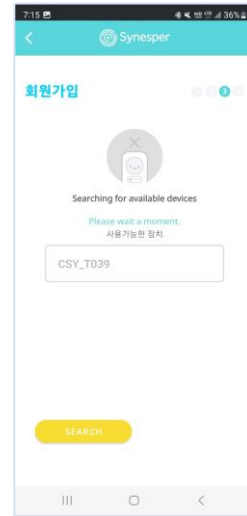

블루투스를 통해
기기 찾기

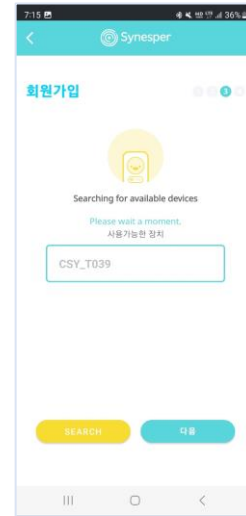

기기 등록 완료




회원 가입 완료

어플리케이션 사용 방법 ▶ 로그인 & 신호측정



생성한 회원 정보
입력하여 로그인

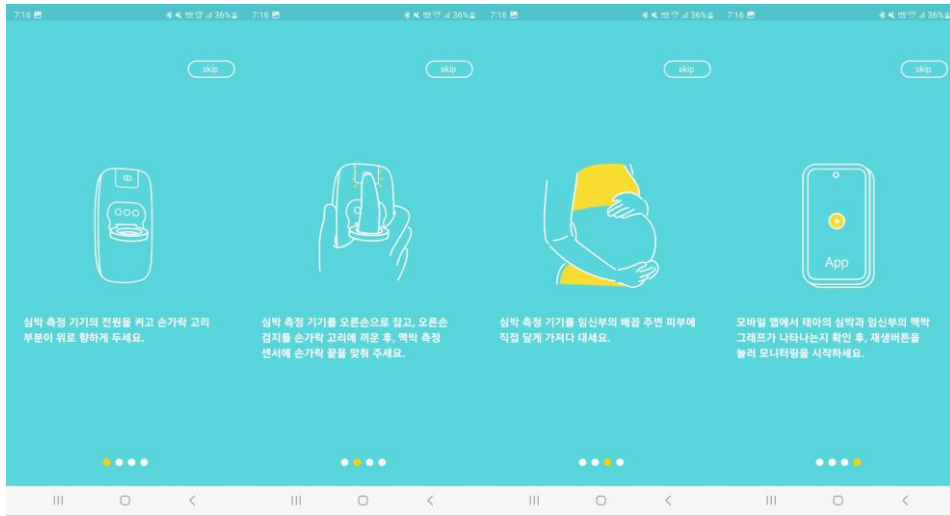

간단한 기기 사용 및 측정 방법



어플리케이션의 측정 페이지
메인화면 중간의 재생버튼을
눌러 신호 측정 시작



어플리케이션
신호 기록 진행




기록이 끝나면 중앙
재생버튼을 눌러
데이터 저장 완료




어플리케이션 사용 방법


▶ 누적데이터 확인 & 프로필 설정 & 알림 기능

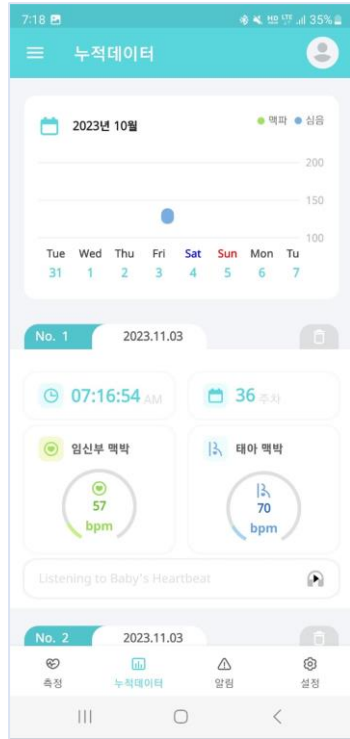

누적데이터 메뉴란의
누적데이터 확인
(심음 재생 가능)

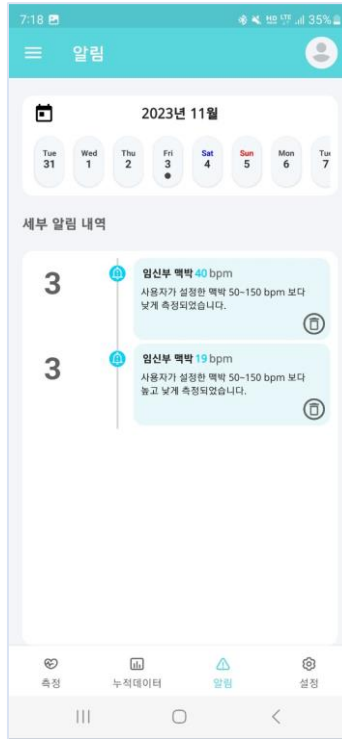


설정 페이지에서
사용자 심박수
알람 범위 설정 후,
어플리케이션의
자체 알림 기능을 통해
사용자 건강정보 확인

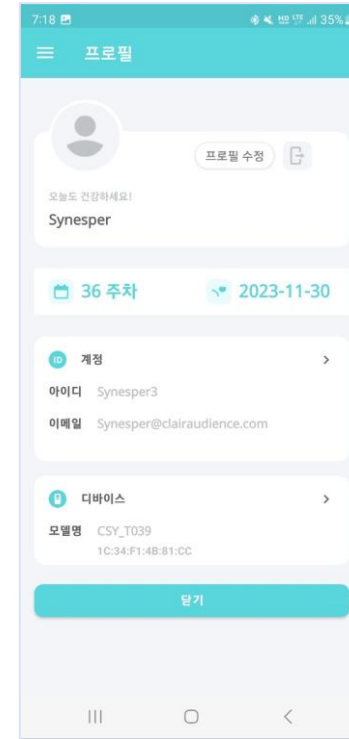


프로필 설정에서
개인정보 수정 가능

기기 사용 방법

▶ 세부 정보

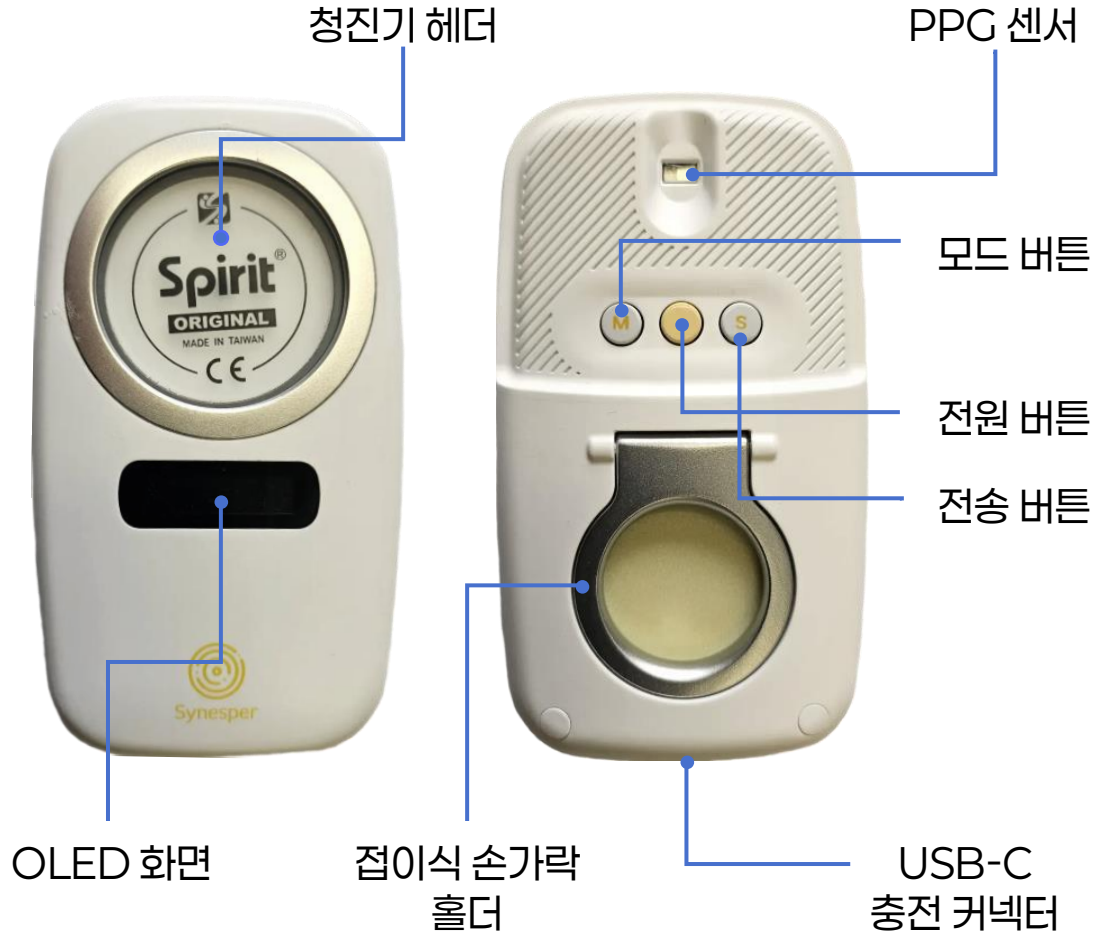


▶ 기기 사용방법

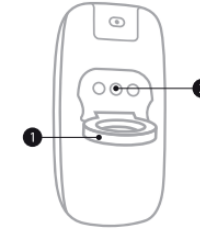

- 1 Synesper의 손가락 고리 부분이 위로 향하게 두세요.
- 2 Synesper의 가운데 버튼을 길게 (5초) 눌러 전원을 켜세요
*다시 가운데 버튼을 길게 1초 이상 누르면 전원이 꺼집니다.



- 3 스마트폰에서 Synesper 앱을 실행한 후, **설정-디바이스** 메뉴에서 Synesper와 블루투스 연결합니다.

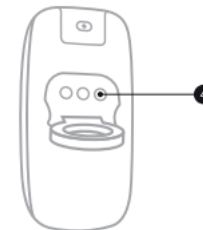

- 4 Synesper의 오른쪽 버튼을 짧게 눌러서 Synesper의 측정 데이터 전송을 시작합니다.



- 5 Synesper를 오른손으로 감싸듯 잡고, 손가락 고리에 검지 또는 중지 손가락을 끼운 후, 맥박 측정 센서에 손가락 끝을 맞춰 주세요.

실제로 사용하기


기기는 이렇게 잡으세요!




※기기 상단 PPG센서에 중지 접촉 시 가운데에 닿도록 유의해주시요.



태아 심음 측정 예시

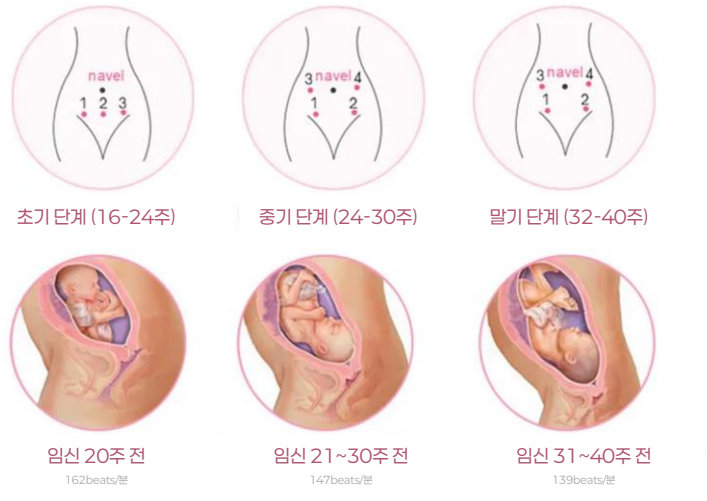

※임신 주차에 해당하는 태아의 위치를 참고하여 측정 부탁드립니다.

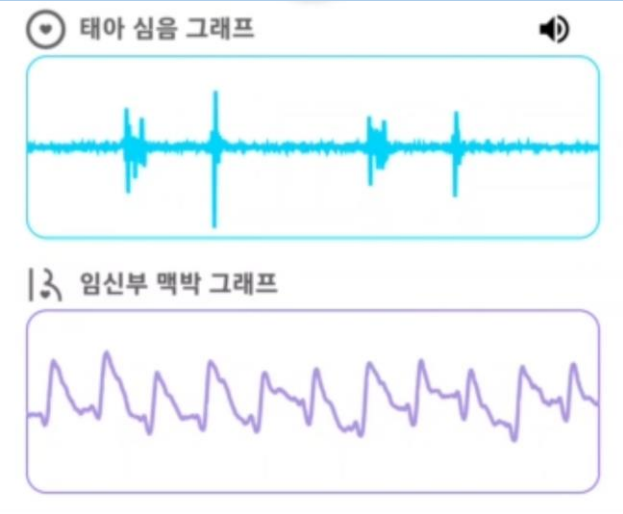

▶태아 및 산모 측정: 임신 주기에 따라 심음 신호가 맥파보다 훨씬 더 많이 나오는 것으로 나타납니다. (태아 심박수 90~160회 / 일반인 80회)

※ 심음 신호 및 맥파 신호는 사용자의 개인 생체 특성, 측정 위치 및 임신 주차에 따라 증폭 크기, 모양이 다릅니다.